

(AB) 2017/746 (IVDR) Yönetmeliğine göre in vitro tanı tıbbi cihazı

H. PYLORI ÜREAZ TEST KASETİ

Mide Biyopsilerinde Helicobacter pylori'nin Hızlı Tespiti İçin



HelicoMax^{plus}: Yeni Nesil

Helicobacter Pylori Test

H. pylori'yi tespit etmenin çeşitli yöntemleri olmasına rağmen, hızlı üreaz testi kullanılarak yapılan biyopsi testi, dünya çapındaki profesyoneller tarafından "Altın Standart" olarak kabul edilmektedir.

HelicoMax Plus Hızlı Üreaz Testi (RUT), piyasadaki en etkili ve kullanımı en kolay Hızlı Üreaz Testidir. HelicoMax Plus RUT, mide mukozası biyopsilerinde H. pylori enfeksiyonlarını tespit etmeyi her zamankinden daha hızlı, daha kolay, daha ucuz ve daha doğru hale getiren önemli iyileştirmeler sunmaktadır.




ÖZELLİK	AVANTAJ
Soğutma Gerektirmez	Oda sıcaklığında saklanabilir. Sıcaklık kaydı tutmaya gerek yok.
Hızlı Sonuçlar	Pozitif sonuçlar 1 dakika gibi kısa sürede, negatif sonuçlar 1 saatte elde edilir.
Doğru	%99 hassasiyet, %97 özgüllük
Kuru Test	İnkübasyon veya reaktif gerektirmez.
Uygun Maliyetli	Düşük test maliyeti.
2 Yıl Raf Ömrü	Ürünün son kullanma tarihi konusunda asla endişelenmeyin.

1 SAAT HIZLI
H. pylori
tespiti için
üreaz testi

6 Basit Adım

1. Etiket yavaşça kaldırın.

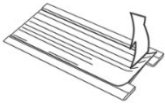


2. Bir veya daha fazla biyopsi örneğini teste yerleştirin.



3. Etiket sıkıca kapatın.



4. Baskı düğmesine basın.

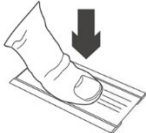




5. Bir saate kadar bekleyin.



6. Sonuçları okuyun.

Red = positive

Yellow = negative

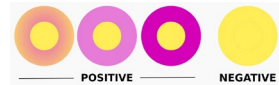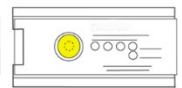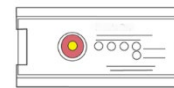

Ürün No.	Açıklama	Ambalaj
01-001	HelicoMax Plus Hızlı Üreaz Test	50 test / kutu
01-003	HelicoMax Plus Üreaz/Gliserin Kontrol Solüsyonu	3 mL damlalıklı şişe

